



veterinary technics Int.
BDO - MEDIPASS *medical division*

Hulpmiddel om uw Ligasure tang te steriliseren (door u zelf te maken)



- ✓ Hierbij een hulpmiddel om uw Ligasure disposabels te steriliseren
- ✓ Eén voor één de buizen vullen met alcohol (tot aan de rand)
- ✓ De eerste buis leeg laten lopen
- ✓ De tweede buis vullen met alcohol en gevuld laten

- ✓ Bij gebruik de Ligasure 10 minuten in de alcohol laten staan.
- ✓ Na 10 minuten de tang uit de buis met alcohol halen en in de lege buis plaatsen
- ✓ De Ligasure tang kan nu drogen (een natte Ligasure tang kan bij gebruik kleine explosief veroorzaken doordat er stroom in contact komt met alcohol)
- ✓ Nadat de Ligasure tang droog is kunt u tijdens de operatie tussentijds de tang in de droge koker plaatsen