





Gebruiksaanwijzing LigaSure 8

Voorzijde apparaat

















Hier vind u aan de linker voorzijde de aan/uit knop, hiermee schakelt u het apparaat aan of uit. Na inschakeling loopt het apparaat een zelf test door. Ook hoort u een aantal pieptonen. Dit is normaal.

Instellen LigaSure:

Met behulp van de ▲▼ druktoetsen aan de linker voorzijde, stelt u het apparaat in. Dit is verschillend per instrument of klem. U leest de instelling af in het leesvenster links naast de druktoetsen.

De instelling kan variëren van één  tot maximaal vijf  groen gekleurde blokjes.

Instellingen per type LigaSure klem:

Type klem:	Bijbehorend insert:	Aanbevolen instelling:
LS 2070 STD	LS 2071	
LS 3090 MAX	LS 3092	 á 
LS 2110 AXS	LS 2111	 á 
LS 3110 XTD	LS 3112	 á 
LS 1000 5MM LAP	INSTRUMENT	
LS 1037 ATLAS	INSTRUMENT	 á 
LS 1020 ATLAS 20cm	INSTRUMENT	 á 
LS 1200 PRECISE	INSTRUMENT	
LS 1500 5MM LAPV	INSTRUMENT	
LS 1520 5MM V 20cm	INSTRUMENT	 á 

Stekker van LigaSure insert/instrument insteken in opening linker voorzijde: **Let op** dat **groen** lampje gaat branden!

Bediening LigaSure: (alleen door operateur)

Druk de paarse activatie knop of voetschakelaar in en houdt deze vast totdat piep klinkt: Zodra piep klinkt is de seal volledig. Hierna schakelt het apparaat automatisch de stroom naar de klem uit.. Seal kan –indien gewenst- worden doorgenomen door de operateur.

Eventueel kan, licht overlappend aan de eerste seal, een tweede seal geplaatst worden.

Instellen Bipolair: Met behulp van de ▲▼ druktoetsen aan de rechter voorzijde van het apparaat verandert u de Bipolaire instellingen. Op de uitleesvensters ziet u de ingestelde waarde. Gebruik passend bipolair instrument.

Bediening Bipolair: (alleen door operateur) Druk blauwe voetschakelaar in zolang als gewenst door operateur.

Plaatsen insert: Plaats de insert op de daarvoor bedoelde klem. Let op: Elk type insert past op slechts één type klem. Onderaan e klem bevindt zich een uitstekende lip. Hier de insert als eerste plaatsen. Daarna de insert langs de benen van de klem plaatsen en zo vloeiend mogelijk op de klem drukken. De klem nu openen en de pinnetjes van de insert in de gaatjes van de klem drukken.

Losmaken insert: Het verwijderen van de insert geschiedt in omgekeerde volgorde van het plaatsen.

Achterzijde apparaat:

Geluidsknop, deze bevindt zich links achterop het apparaat, hiermee kunt u het geluid regelen.

Aansluiting voetschakelaar: Paarse uitgang: LigaSure voetschakelaar (met paarse stekker)
Blauwe uitgang: Bipolaire voetschakelaar (niet standaard meegeleverd)