



## Schoon maken LigaSure disposabels



Betreffende het schoon maken van de LigaSure disposabels worden diverse methodes gebruikt.

- Sommige leggen de disposabels eerst in een bad met Hybiscrub.
- Uiteraard hebben we het altijd over dat gedeelte wat de patiënt in gaat en niet de handvaten. Ze laten de disposabels dan een uur liggen.
- Een andere mogelijkheid is om neodisher® MediClean forte te gebruiken. (een reinigings middel welke door de ziekenhuizen gebruikt wordt voor het reinigen van chirurgische instrumenten (incl. instrumentarium voor Minimale Invasieve Chirurgie), micro-instrumentarium, flexibele endoscopen en anesthesietoebehoren. Dompeltijd met temperatuuradvies is in de brochure aangegeven.
- De disposabels worden vervolgens huishoudelijk schoongemaakt met een borsteltje (eventueel tandenborstel).
- Dan wordt er door diverse de tangen in een trilbak geplaatst.
- Om te desinfecteren (niet om te steriliseren) wordt wel een Instru-Plus verdunning gebruikt.
- Hierna wordt alles met kraanwater schoon gespoeld.
- Als laatste kan men dan kiezen voor het sterilisatie proces met Sterilium of met Formaldehyde tabletten.