



Sputen type instellingen voor IVAC TCI & TIVA spuitpomp

De IVAC TCI & TIVA spuitpomp kan gekalibreerd worden bij diverse typen standaard disposabel sputen.

Engels/Duits type	Frans type	Sputtype	Opmerking
Sy0	B-D	IVAC en B-D Plastipak en Sherwood Monoject	(alleen 50ml en 100ml)
Sy0	B-D	B-D Plastipak	(alleen 5ml, 10ml, 20ml, 30ml en 50ml)
Sy1	Ter	Terumo	(alleen 10ml, 20ml, 30ml en 50ml)
Sy2	BR-O	B.Braun Omnifix	(alleen 5ml, 10ml, 20ml, 30ml en 50ml)
Sy3	BR-P	B.Braun Perfusor	(alleen 20ml en 50ml met Sy3 kit)
Sy4	-	Fresenius injectomat	(alleen 50ml)
Sy5	Shr	Sherwood Monoject en IVAC (alleen 50ml)	(alleen 5ml, 10ml, 20ml, 30ml en 50ml)
Sy6	-	R.R.Pronto	
Sy7	-	BD Plastipak (wereldwijde versie)	(alleen 20ml, 30ml en 50ml)
Sy8	-	Once	(alleen 50ml)
SyA	-	Janpol	

Om er voor te zorgen dat de pomp op de juiste manier werkt moet u allen het juiste merk en type gebruiken die op de pomp staan.

Om het spuittype te verwisselen:

1. Zorg er voor dat de pomp op de uit positie staat.
2. Houd de startknop ingedrukt en zet de schakelaar om naar de aan positie.
3. Display zal aangeven ---
4. Enter 462 door de schaal selectie knoppen in te drukken.
5. Druk op stop en display zal aangeven SyX, waarbij de X het aangewezen type spuit ingevoerd moet worden.
6. Druk rustig de schaal knop in tot de gewenste spuit type te voorschijn komt (zie schema).
7. Druk op stop om het gewenste spuittype te bewaren en druk KVO knop in.
8. Druk op start om naar het normale programma te gaan.
9. Zet de spuitpomp uit en weer aan en controleer of het juiste spuittype is ingevoerd.