



veterinary technics Int.
BDO - MEDIPASS *medical division*

Het installeren van de Irma op de Pocket PC

- 1/ Zet de Pocket PC aan
- 2/ Ga naar ***Programs***
- 3/ Ga naar ***File Explorer***
- 4/ Vervolgens ***My Documents***
- 5/ Zoek ***My Device***
- 6/ Klik aan ***SD-Card***
- 7/ Nu zit je in het SD kaartje waar je ***VEO Install*** moet selecteren
- 8/ Het programma wordt nu geïnstalleerd met een aantal vragen zoals gewend bij installeren.